

# Otikon MINI

Kapi za uši, na bazi maslinovog ulja

## Namena:

Za ublažavanje bola u uhu, uklanjanje viška ušnog voska (cerumena) i održavanje dobre higijene ušiju.

## Indikacije za upotrebu:

Proizvod se preporučuje kod bola u uhu i kao deo redovnog rutinskog održavanja higijene ušiju u slučaju nagomilavanja cerumena. Prikladan je za upotrebu kod odraslih i dece od pet godina i starije. Zbog nedostatka specifičnih kliničkih dokaza kod mlade dece, upotreba kod dece mlade od pet godina dozvoljena je samo uz preporuku lekara ili farmaceuta.

Upotreba proizvoda tokom perioda dužeg od 30 dana ograničena je na situaciju kada se nakupi previše cerumena zbog toga što uho proizvodi previše cerumena ili kada ušni mehanizam samočišćenja nije adekvatan.

## Sastav:

Maslinovo ulje, uljani ekstrakt cveta divizme u maslinovom ulju (*Verbascum thapsus*), uljani ekstrakt cveta nevena (*Calendula officinalis*) u maslinovom ulju, uljani ekstrakt herbe kantariona (*Hypericum perforatum*) u maslinovom ulju, ulje lavande (*Lavandula officinalis*), vitamin E u suncokretovom ulju, ekstrakt ruzmarina (*Rosmarinus officinalis*) u biljnom ulju, ulje belog luka, karnozinska kiselina.

## Kada ne smete koristiti ovo medicinsko sredstvo?

Nemojte koristiti ovaj proizvod ako ste osetljivi na bilo koji od njegovih sastojaka. Nemojte koristiti ovaj proizvod u slučaju oštećene bubne opne, sekrecije ili krvarenja iz spoljašnjeg uha, ekcema uha, tokom trudnoće ili perioda dojenja.

## Upozorenja:

- Isključivo za spoljašnju upotrebu – za nanošenje u uho.
- Ne sme se progutati. Ukoliko proizvod slučajno progutate, javite se lekarskoj ordinaciji za hitne slučajeve i sa sobom ponesite ambalažu proizvoda. Nemojte izazivati povraćanje ukoliko to specifično ne naloži lekar.
- Nemojte stavljati ovaj proizvod u oči ili na sluzokožu ili otvoreno tkivo.
- Izbegavajte kontakt sa očima. U slučaju da dođe do kontakta sa očima, ispirajte oči tekućom vodom nekoliko minuta. Ukoliko je potrebno, zatražite pomoć lekara.

## Neželjena dejstva:

Osim željenog dejstva, tokom upotrebe proizvoda može doći i do privremenih neželjenih reakcija kao što je blaga lokalna iritacija. Ta dejstva brzo nestaju čim se organizam privikne na proizvod. Ukoliko osetljivost kože uporno traje, obustavite tretman i potražite savet lekara.

## Neželjena dejstva koja zahtevaju posebnu pažnju:

U slučaju ozbiljne iritacije, osipa, upale, lučenja ili krvarenja (koje nije postojalo pre upotrebe proizvoda) – a takvi slučajevi su retki, obustavite upotrebu proizvoda i potražite savet lekara. Ukoliko doživite neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu ili doživite promenu svog opšteg dobrog stanja, obustavite upotrebu proizvoda i konsultujte se sa svojim lekarom.

## Uputstvo za upotrebu:

Pre prve upotrebe, preporučuje se da 1-2 puta kratko pritisnete pumpicu usmerenu u lavabo da proverite da li mlaznica radi

1. Promućkajte bočicu.
2. Ispravite mlaznicu i vrh mlaznice stavite do približno pola centimetra u otvor ušnog kanala. Vodite računa da ne gurnete mlaznicu duboko u uho.

3. Prsnite 1-2 kratka tanka mlaza od kojih svaki traje otprilike jednu sekundu.

4. Sačekajte pola minuta i onda u uho stavite čepić od vate.

5. Posle prskanja možete bočno nagnuti glavu da biste ubrzali prodiranje kapi u uho.

6. Posle upotrebe ponovo savijte mlaznicu.

## Doziranje:

Za uklanjanje viška ušnog voska

1 prskanje dnevno, u svako uho. Ponovite onoliko puta koliko je potrebno u zavisnosti od toga koliko viška cerumena uho proizvodi. Nemojte prekoračivati preporučenu dnevnu dozu.

Napomena: za upotrebu tokom perioda dužih od 30 dana, pogledati odeljak pod naslovom Indikacije za upotrebu

## Za ublažavanje bola u uhu:

1-2 kratka prskanja u svako uho 3 puta na dan. Ponavljajte postupak tokom 5-7 dana ili dok ne osetite poboljšanje (ali ne duže od 7 dana). Nemojte prekoračivati preporučenu dozu.

## Napomene:

- Kod dece, proizvod primenjuje isključivo odraslo lice koje vrši i nadzor nad primenom.
- Kada se proizvod koristi za uklanjanje viška ušnog voska – a posle korišćenja tokom perioda dužeg od 2 meseca, treba se konsultovati sa lekarom koji će proceniti stanje uha i količinu ušnog voska koji je i dalje prisutan u uhu.
- Kada se proizvod koristi za ublažavanje bola u uhu – ukoliko ne dođe do poboljšanja posle 3 dana lečenja, treba se konsultovati sa lekarom.
- Radi održavanje higijene, glavu prskalice treba očistiti vlažnom krpom ili oprati toplom vodom posle svake upotrebe.

## Čuvanje:

Čuvati na hladnom mestu (na temperaturi nižoj od 25°C). Čuvati zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti. Ne držati u frižideru i ne zamrzavati. Čuvati proizvod u njegovoj originalnoj ambalaži. Zatvoriti ambalažu posle svake upotrebe. Ne koristiti proizvod posle isteka roka upotrebe odštampanog na ambalaži. Čuvati van domašaja dece.

## Upotreba nakon prvog otvaranja:

Nakon prvog otvaranja, proizvod se može koristiti 3 meseca, ali nikako posle datuma isteka roka upotrebe odštampanog na ambalaži.

## ▲ Proizvođač:

Tree of Life Pharma Ltd., VAT # 513071621  
1 Bat-Sheva Street, POB 799, Lod 7110604, Israel.

## Ovlašćeni predstavnik za Republiku Srbiju:

Life Pharma d.o.o., Beogradskog bataljona 4, 11030 Beograd

## Distributer za Republiku Srbiju:

Oktal Pharma d.o.o.,  
Milorada Jovanovića 11, 11147 Beograd.

## Nosilac upisa u registar medicinskih sredstava Crne Gore:

Farmont MP d.o.o., Kosić - Stari put bb, Danilovgrad,  
Crna Gora.



SERB.MONT-OTKN-PIL-V001

Datum poslednje revizije: februar 2021.